



AVEC **FUTAR**[®], C'EST LE TOOOOP

ENREGISTREMENTS DE L'OCCLUSION



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

FUTAR® – TOUT SIMPLEMENT IMPRESSIONNANT !

FUTAR® – VUE D'ENSEMBLE DES AVANTAGES

Enregistrement de l'occlusion

La famille Futar® se décline en sept versions de matériaux à base de silicone A pour l'enregistrement des rapports occlusaux.

SUPER QUALITÉ, SUPER INNOVATIONS

- « Made in Germany » : La recherche, le développement et la production sont réalisés en Allemagne.

SUPER POLYVALENCE

- Le choix selon vos besoins entre une dureté élevée ou maximale et un temps de prise standard ou rapide!

SUPER DEPUIS PLUS DE 20 ANS

- Faites confiance au leader du marché en Allemagne* !

Ne faites aucun compromis pour votre enregistrement de l'occlusion !

* selon GfK (société d'analyse de la consommation)

Futar® /Futar® Fast :

- ✓ Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- ✓ Dureté dans la prise, flexible dans l'usinage : facile à découper
- ✓ Aussi disponible en variante Fast : **pour un plus grand confort du patient !**



Futar® Easy /Futar® Easy Fast:

- ✓ Dureté finale élevée (Shore-A 90)
- ✓ Peu d'effet de ressort
- ✓ Facile à découper
- ✓ Aussi disponible en variante Fast
- ✓ **Faible force de distribution – facile à appliquer**



Futar® D /Futar® D Fast :

- ✓ Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- ✓ Excellente usinabilité
- ✓ Aussi disponible en variante Fast : **pour un plus grand confort du patient !**



Futar® D Slow :

- ✓ Dureté finale extra-élevée (Shore-D 43)
- ✓ Durée de préparation extra-longue pour les applications longues, comme l'enregistrement de l'occlusion myocentrique, la fixation de piliers d'empreinte ou le façonnage personnalisé des bords
- ✓ Utilisation polyvalente, également indiqué en laboratoire



La gamme Futar® peut bien plus encore :

- Précision du résultat grâce aux excellentes propriétés viscoélastiques
- La faible élasticité empêche l'effet de ressort lors de l'articulation du modèle
- Élimination aisée des excédents par rupture

UTILISATION SIMPLE, PROPRE ET RAPIDE !

FUTAR® – LES PERFORMANCES

Arcade dentaire

 Matériau d'enregistrement de l'occlusion	 Mélange	 Durée de préparation à 23 °C	 Durée de prise en bouche	 Durée totale de la prise*	 Dureté (env.) Shore
Futar®		30 s	90 s	02:00 min	A 90
Futar® Easy		30 s	90 s	02:00 min	A 90
Futar® D		30 s	90 s	02:00 min	D 43
Futar® D Slow		90 s	03:00 min	04:30 min	D 43

* Durée totale de la prise (retrait de la bouche) depuis le début du mélange.

Segment

 Matériau d'enregistrement de l'occlusion	 Mélange	 Durée de préparation à 23 °C	 Durée de prise en bouche	 Fin de prise*	 Dureté (env.) Shore
Futar® Fast		15 s	45 s	01:00 min	A 90
Futar® Easy Fast		15 s	45 s	01:00 min	A 90
Futar® D Fast		15 s	45 s	01:00 min	D 43

* Durée de prise totale (après retrait de la bouche) à compter du début du mélange

Réalisez
votre enregistrement
de l'occlusion
**EN UNE SEULE
MINUTE !**

FUTAR® – LA GAMME



Produits	Normal pack 2 cartouche de 50 ml, 6 embouts mélangeurs bleus	Bonus pack 10 cartouche de 50 ml, 30 embouts mélangeurs bleus
Futar®	REF 1191211	REF 2827711
Futar® Fast	REF 1192611	REF 2827611
Futar® Easy	REF 1192311	–
Futar® Easy Fast	REF 1192411	–
Futar® D	REF 1193211	REF 2827811
Futar® D Fast	REF 1196111	REF 2827911
Futar® D Slow	REF 1195111	–



Made
in
Germany

NOTES

Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57201 Sarreguemines Cedex,
France
Tél. : +33 3 87 28 86 17
Mobile: +33 6 43 27 82 04
contact-fr@kettenbach.com
www.kettenbach-dental.fr



012736_4223


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent