



Produits Dentaires SA

Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey . Switzerland

PELLA

Transparent Crown Forms

Moules pour couronnes transparents

For the « peel-off » technique
Pour la technique « peel-off »

78 Shapes . 78 formes

39 right (R) yellow . 39 droite (R) jaune

39 left (L) pink . 39 gauche (L) rose

Rack of 6 detachable plastic box
for individual pairs

Jeux de 6 boîtes détachables
pour paires individuelles



6-pack box
Boîte 6-pack

Directions for use

« Peel-off » for making individual jacket crowns
of synthetic resin in the mouth of the patient

Mode d'emploi

Type détachable « peel-off » pour la confection
en bouche de couronnes individuelles en résine synthétique



- 1 Prepare stump in the same manner as for porcelain jacket crowns. Make undercuts.
Préparer le moignon de la dent comme pour une couronne Jacket en porcelaine. Ménager des rétentions.



- 2 Trim Crown Form on the cervical portion to fit stump.
Découper le moule choisi dans sa partie cervicale pour l'adapter au moignon.



- 3 Fill Crown Form with polymerisable resin (follow the directions for use of the manufacturer).
Remplir le moule avec la résine polymérisable de la teinte choisie (voir le mode d'emploi du fournisseur).



- 4 Fit the filled Crown Form. Let excess ooze out. Hold Crown firmly in position.
Mettre le moule en place en laissant sortir l'excès. Le tenir fermement.



- 5 Wait until the resin has hardened (follow the directions for use of the manufacturer).
Attendre jusqu'au durcissement complet de la résine (voir le mode d'emploi du fournisseur).



- 6 When completely hard, slit the Crown Form on the approximal or lingual side and peel off the Crown Form.
Lorsque la résine est complètement durcie, fendre le moule côté proximal ou lingual et décortiquer la couronne.



- 7 Polish the finished acrylic crown.
Poir la nouvelle couronne en résine.



- 8 The new acrylic crown is complete.
La nouvelle dent en résine est terminée.

R 101	L 101	
R 111	L 111	
R 121	L 121	
R 131	L 131	
R 141	L 141	
R 151	L 151	

Figure 1 displays 12 line drawings of shoe last shapes, arranged in a 4x3 grid. The columns are labeled R (Right), L (Left), and T (Toe) at the top. The rows are labeled 2, 12, 22, and 32 on the left. Each cell contains a line drawing of a shoe last. The shapes vary in toe shape (rounded, pointed, or square) and heel shape (low, medium, or high).